


Pupillenreaktion und Drogenkonsum

Drogenart	Pupillengröße	Reaktion
Cannabis	normal bis erweitert	normal bis verlangsamt (gerötete, glasige Augen)
Heroin/Opiate	verengt	kaum feststellbar
Kokain	erweitert	verlangsamt
Ecstasy/Amphetamine	erweitert	verlangsamt

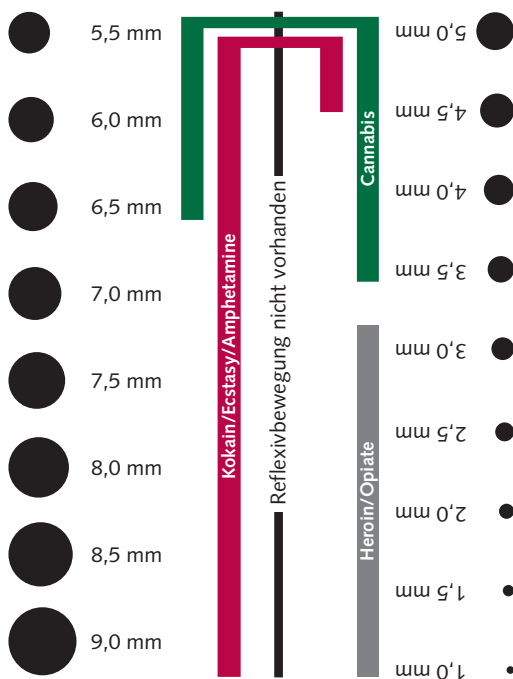


Nachweisfenster Cannabis (THC)

Verdacht: THC-Drogen-Konsum innerhalb der letzten 60 Minuten

Probenahme **Speichel** (Mund)


Probenahme: positiv Bluttest innerhalb der nächsten 4 Stunden

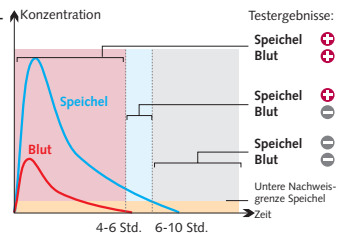


Verdacht: THC-Drogen-Konsum innerhalb der letzten 1 bis 4 Stunden

Probenahme **Schweiß** (Stirn)

Probenahme: positiv Bluttest schnellstmöglich!

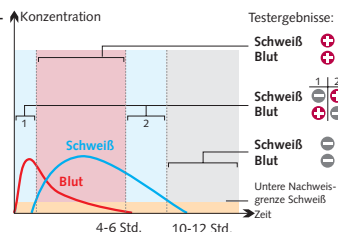

Probenahme **Urin**

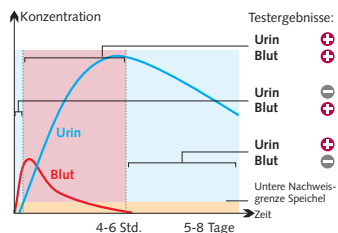

Securetec Detektions-Systeme AG
 Rosenheimer Landstraße 129 • D-85521 Ottobrunn/München
 T +49 (0)89 62 78 96-51 • F +49 (0)89 62 78 96-52
 eMail info@securetec.net • www.securetec.net

Zuverlässige Testergebnisse mit dem DrugWipe® Drogenschnelltest

Drogenkonsum innerhalb ...

... der letzten
1 bis 4 Stunden


... der letzten
60 Minuten

Probenahme
Speichel

(feuchte Zunge, Mundhöhle,
Wangenninnenseiten – leicht
abklopfen, wenn zu viel
Speichel auf dem Wischteil ist)

Probenahme
Schweiß
(Stirn am Haaransatz,
Nacken, hinter dem Ohr)


① Wischteil von
Nachweisteil
trennen

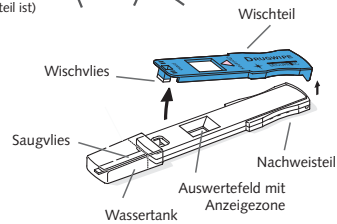


Nur bei Probenahme
Schweiß Wischvlies leicht
anfeuchten




② Probenahme mit
kreisenden Bewegungen
und mäßigem Druck

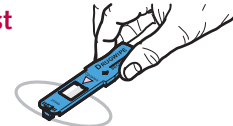


③ Wischteil wieder auf dem
Nachweisteil einrasten, dabei
ist ein Doppelklick hörbar

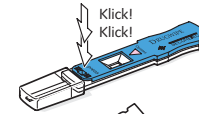


④ Wassertank abnehmen und
bis zur Markierung mit
Leitungswasser befüllen.

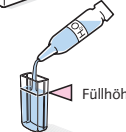

⑤ Saugvlies in den gefüllten
Wassertank eintauchen,
dabei bis 15 zählen. Vorsicht:
das weiße Plastikgehäuse
nicht mit eintauchen!

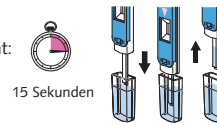


⑥ DrugWipe® für ca. 8 bis 10
Minuten waagrecht halten.
In der Anzeigezone erschei-
nen die rote Kontrolllinie (CL)
sowie weitere rote Linien,
wenn Drogen konsumiert

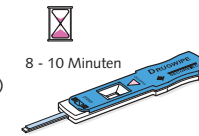


Testergebnis (5-fach Test) innerhalb von 10 Minuten auswerten!

Test erfolgreich

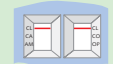


Kein Drogenkonsum
(Rote Kontroll-Linie
sichtbar)


Test erfolgreich: Drogen positiv

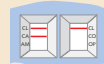


Cannabis

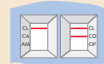

Kokain

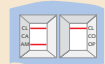

Ecstasy/
Amphetamine

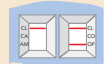

Heroin/Opiate



Cannabis, Kokain,
Ecstasy/Amphetamine,
Heroin/Opiate

Test fehlerhaft



Fehlerursache:
Test defekt oder
falsche Handhabung

Für detaillierte Informationen bitte Handhabungsvorschrift anfordern.